

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO

Recomendado :

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4

Día 0 Después de 7 a 15 días Después de 15 a 30 días Después de > 30 días (opcional)

c.stim™
Sistema I.P.L.



ANTES DE UTILIZAR:

1



Leer y firmar el consentimiento informado.



Acudir a la consulta con la **piel limpia, sin cremas ni maquillaje**, y piel rasurada en el caso de los hombres.

2



CONTRA INDICACIONES:

- Piel con heridas o quemaduras, o que presenta algún proceso infeccioso
- En mujeres embarazadas y en periodo de lactancia
- Si se ha expuesto a rayos UV artificiales o uso de autobronceador en las últimas dos semanas
- Consulta dermatológica imprescindible en caso de antecedentes cutáneos en el rostro de: cáncer, vitiligo, psoriasis, lupus eritematoso, queloides...
- Tratamiento fotosensibilizante en curso
- Antecedentes de hipersensibilidad al sol

3

RECOMENDACIONES SOBRE LOS FOTOTIPOS (escala de Fitzpatrick):



FOTOTIPO V:

Dos semanas antes del tratamiento: probar el efecto del protocolo sobre una zona de piel visible, elegida por el paciente (p. ej., interior del muslo, exterior del antebrazo)

Si transcurrido este tiempo no se desarrolla ningún eritema ni efecto no deseado, se procederá al tratamiento. En caso contrario, se descartará el tratamiento.

1

ANTES DEL TRATAMIENTO:


- Instalar al paciente en un **sillón ligeramente reclinado**.
- Usar una cinta de cabeza para **proteger el cabello**, limpiar la piel con agua micelar o solución fisiológica, evitar las soluciones a base de alcohol.
- Aplicar una **capa fina de gel transparente** (párpado y sien).
- Proteger los **tatuajes, lunares o lesiones** con parches adhesivos.
- Colocar al paciente los **protectores oculares**.
- Colocar las **gafas de protección** al operador.



2

DURANTE EL TRATAMIENTO:

- Ajustar la fluencia en **8-10 J/cm²**.
- Pedir al paciente que **cierre bien los ojos con los protectores oculares puestos** (el destello es muy potente).
- Colocar la pieza de mano sobre la piel sin ejercer **demasiada presión**.
- Realice **4 disparos en el área peri-orbital inferior**:
 - 3 disparos verticales sobre cada mejilla, 1, 2, 3
 - 1 disparo vertical sobre cada sien, 4.

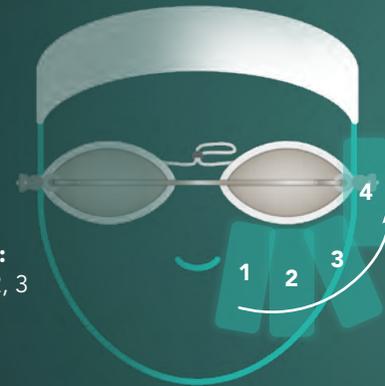

3

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO:

- Retirar los **protectores oculares**.
- Limpiar el **gel de la piel** con agua micelar.
- Aplicar una **crema hidratante** y, en caso de que aparezca eritema, aplicar una pomada de hidrocortisona al 1%.
- Evite la **exposición al sol después del tratamiento I.P.L o use protector solar**.

Para obtener información más detallada sobre el uso de C.Stim®, consulte las instrucciones del aparato. ME00508A_29/09/2022